


INSTRUCCIONES PARA SU SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente y manténgalas para futuras referencias. Siguiendo a los requisitos del BS 5724 Parte 1; 1989 e IEC 601-1 1988, estas instrucciones están siempre disponibles para el operario y para el trabajador cualificado de mantenimiento.

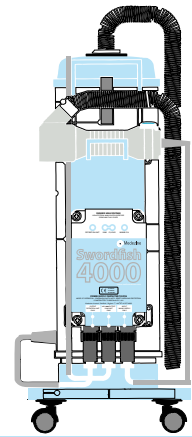


 Medezine

4000

Sierra para autopsias y ortopedias

www.medezinesaws.com

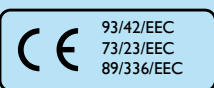

Después de examinar el Sistema Medezine 4000, se ha visto que reúne todos los requisitos del estándar IEC 601-1 para Equipos Eléctricos de Medicina.
Número del informe de prueba 74543

PRÓLOGO

La unidad de filtración, está diseñada solo para partículas secas. Nunca se debe utilizar para extraer líquidos.

Cuando el equipo no se utiliza o a la hora de su mantenimiento, siempre hay que desconectarlo del suministro de electricidad, quitando la clavija de la red de suministro de la toma.

PUESTA A PUNTO

Desembale el equipo y compruébelo con el albarán de entrega.

Mire la información que hay sobre el equipo, en la etiqueta sobre el índice de conformidad para el suministro eléctrico.

Para ver las instrucciones de su montaje, haga el favor de ir a la página 3.

IMPORTANTE. ESTE EQUIPO HAY QUE CONECTARLO A TIERRA.

Los cables de la red de suministro de este equipo tienen diferentes colores para los siguientes códigos:

VERDE Y AMARILLO	TIERRA
AZUL	NEUTRAL
MARRÓN	CARGA

Si los colores del cable de la red de suministro no corresponden con las marcas terminales en su clavija, proceda de la siguiente manera:

El cable de color verde y amarillo tiene que ser conectado con la Terminal marcada por la letra E, con el color verde y amarillo o con el símbolo Tierra.



El cable de color azul hay que conectarlo con la Terminal marcada por la letra N o con el color negro


El cable de color marrón hay que conectarlo con la Terminal marcada por la letra L o con el color rojo.

En caso de instalar un modelo de 240V con una clavija de fusible de 13 amperios, que sigue la normativa BS1363, hay que instalar un fusible de 13 amperios.

En caso de instalar un modelo de 110V con una clavija de 110V que sigue la normativa BS196, hay que colocar un fusible de 15 amperios.

En caso de instalar un modelo de 110V con una clavija de 110V, que sigue la normativa BS4343, hay que realizar el suministro con un mecanismo de protección de 16 amperios. Condiciones medioambientales para el transporte y el almacenaje.

Condiciones medioambientales para el transporte y el almacenaje.

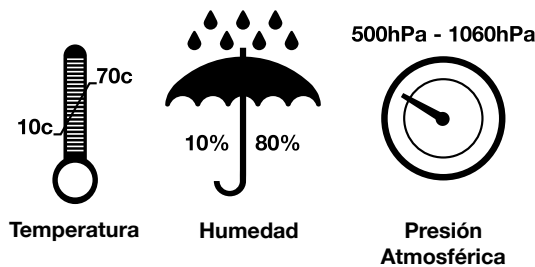

CONTENIDOS

Prólogo	1
Clasificación del equipo	3
Instrucciones de montaje	3
Descripción general	4
Secuencia de funcionamiento	4
Sistema Medezine 4000	5
Suministro de energía Medezine 4000	6
Recambio del fusible Suministro de energía 4000	6
Medezine 4000 Unidad de la Sierra	7
Accesorios para la instalación y piezas desmontables	8
Mantenimiento preventivo e inspección	9
Localización y resolución de problemas	10 -11
Desinfección y esterilización	12
Consejos para el corte	12
Accesorios y piezas desmontables	13
Diagrama esquemático 4000 del cableado	14
Relación de revisiones de filtro	15
Condiciones para la garantía	16
Certificado de la prueba eléctrica	16
Clasificación del equipo	16

CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo clase 1

Equipo tipo B



Equipo no AP/APG

Unidad de la sierra

Equipo hermético IPX7

Suministro de energía

Equipo contra las salpicaduras IPX4

Unidad de filtración

Equipo contra el goteo IPX1

Modo de funcionamiento:-

Continuo, con carga intermitente hasta 3 minutos. Ciclo de tarea 50%.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NO SE PUEDE CONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO HASTA QUE EL MONTAJE ESTE COMPLETO.

- 1 Coloque el chasis en la superficie y asegúrese de que la tuerca de mariposa está suelta.
- 2 Baje la base de la unidad de filtración y colóquelo en el aro de la abrazadera, de esta manera coloque la tuerca de mariposa en el centro sobre el suministro de energía.
- 3 Ajuste la tuerca de mariposa.
- 4 Instale la clavija con el fusible, al cable de entrada de la red de suministro. Esta clavija no es suministrada por Medezine Ltd.
- 5 Para instalar la cuchilla ver página 8.

Si solamente ha comprado la unidad de la sierra y el suministro de energía, comience el montaje en el punto (4).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para ayudar a minimizar los riesgos de infecciones en lugares sensibles, se ha desarrollado la Sierra Oscilante Medezine 4000 con su filtro de aspiración, siempre y cuando éste, se utilice siguiendo las instrucciones del fabricante.

El sistema completo consta de tres unidades.

LA UNIDAD DE LA SIERRA

Esta unidad se alimenta del suministro de energía y está herméticamente cerrada- permitiendo así una desinfección y una esterilización apropiada, sin tener que desmontarla. El motor adjunto no puede contaminarse, por lo que no hay peligro del efecto aerosol. Todos los materiales externos utilizados para su construcción son no corrosivos.

LA UNIDAD DE FILTRACIÓN

Esta unidad se alimenta del suministro de energía. Aportando tres fases eficaces de filtración por medio de un filtro de papel, un filtro de tela y un filtro de cartucho altamente eficaz (filtro de micra), respectivamente. Nunca se debe de utilizar para extraer líquidos. Esta unidad puede filtrar materiales secos o parcialmente húmedos pero nunca jamás los líquidos. Esta unidad no es hermética.

EI SUMINISTRO DE ENERGÍA

Esta unidad se alimenta de la red de suministro y aporta a su vuelta corrientes eléctricas apropiadas para la unidad de la sierra y la unidad del filtro de aspiración. El sistema completo, se activa al encender momentáneamente la unidad de la sierra. En el suministro de energía, se incorpora un mecanismo de limitación de corriente inteligente, para prevenir el uso exagerado de la unidad de la sierra. Esta unidad es hermética.

El usuario puede que quiera, el suministro del equipo en este formato básico- que consta solo de la unidad de la sierra y el suministro de energía. Más tarde el cliente puede añadir una unidad de filtración si así lo desea, sin ningún problema.

El sistema completo Medezine 4000 es capaz de tratar con polvos que son peligrosos para la salud, lo que hace posible su uso en hospitales y ambientes industriales, donde la recogida de desechos de tales escombros tiene un control estricto.

Este equipo no se puede utilizar en lugares donde hay riesgo de explosiones.


Para la movilización del equipo, hay que utilizar la palanca suministrada y nunca tirando de la unidad de la sierra o el cable de la red de suministro.

SECUENCIA DE OPERACIONES

Aviso: Este equipo esta diseñado, para que sea utilizado solamente por personal con formación en esta materia. Medezine Ltd no puede hacerse cargo del uso inapropiado y sin formación de este equipo.

- 1 Enchufe el equipo a una red de suministro apropiada. Compruebe que el indicador del "suministro encendido" en el suministro de energía está encendido.
- 2 Cambie la unidad de la sierra de la posición "park" y pulse y suelte el botón de encendido/apagado. Así, el sistema completo comenzará a ponerse en marcha.
- 3 Pulse y suelte el botón de encendido/apagado otra vez y el sistema se parará.
- 4 Cambie la sierra a la posición de "park".
- 5 Siempre desconecte el equipo de la red de suministro cuando no está en uso.

SIERRA MEDEZINE 4000 PARA AUTOPSIAS Y ORTOPEDIAS

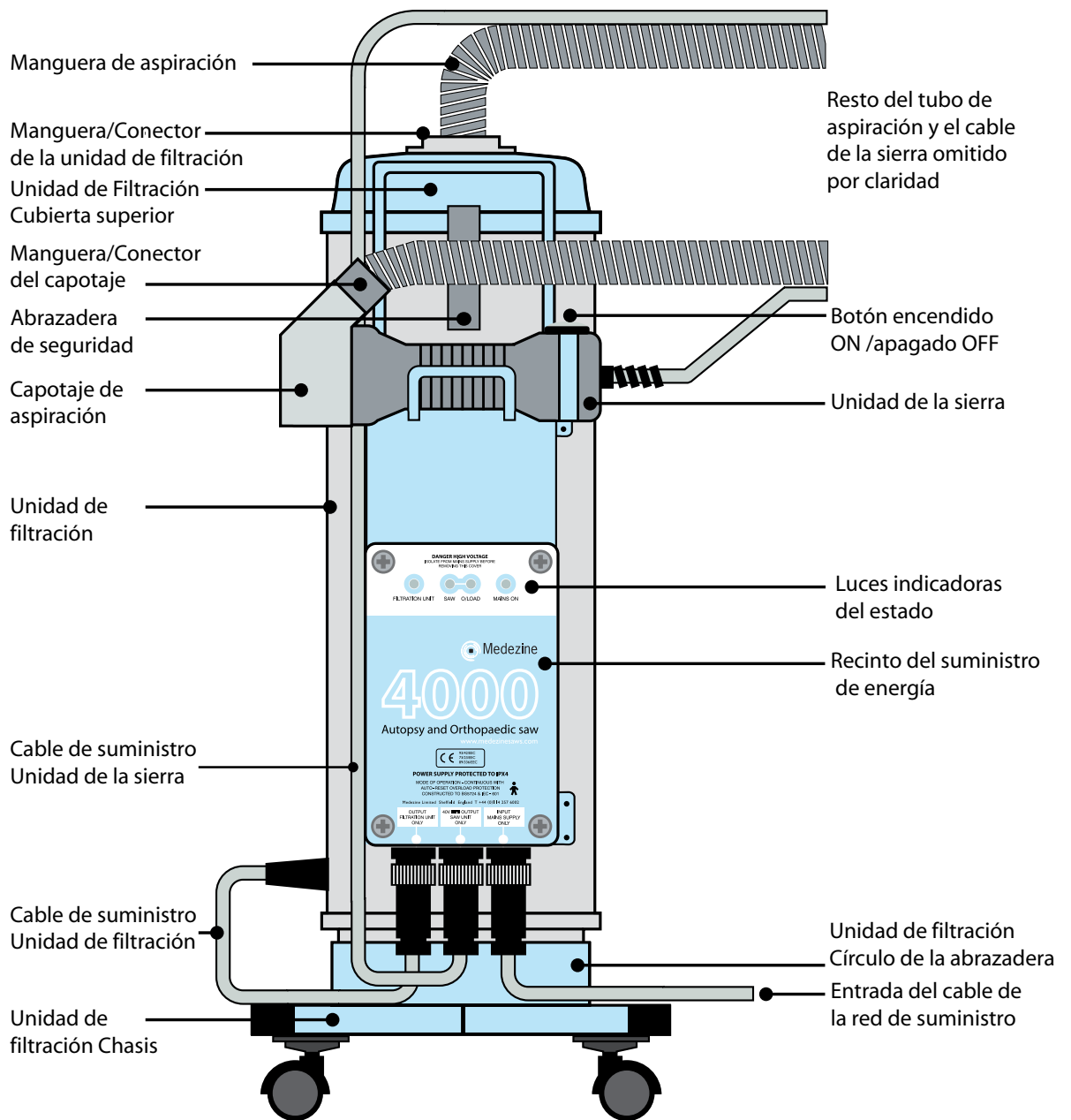


RECAMBIO DE FUSIBLE


ANTES DE QUITAR LA TAPA TIENE QUE AISLAR EL SISTEMA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO.

Los dos fusibles de la red de suministro, están situados dentro del recinto del suministro de energía, tal como se indica. El tipo de fusibles y su clasificación están marcados al lado de los soportes de los fusibles o alternativamente puede ir a la página 14.

Para quitar la tapa, tiene que soltar los cuatro tornillos. Antes del recambio asegúrese de que el precinto de goma está en la parte inferior de la tapa y que no se haya movido. Ajuste la tapa asegurándose de que las dos esquinas están enlazadas y la tapa se cierra bien.

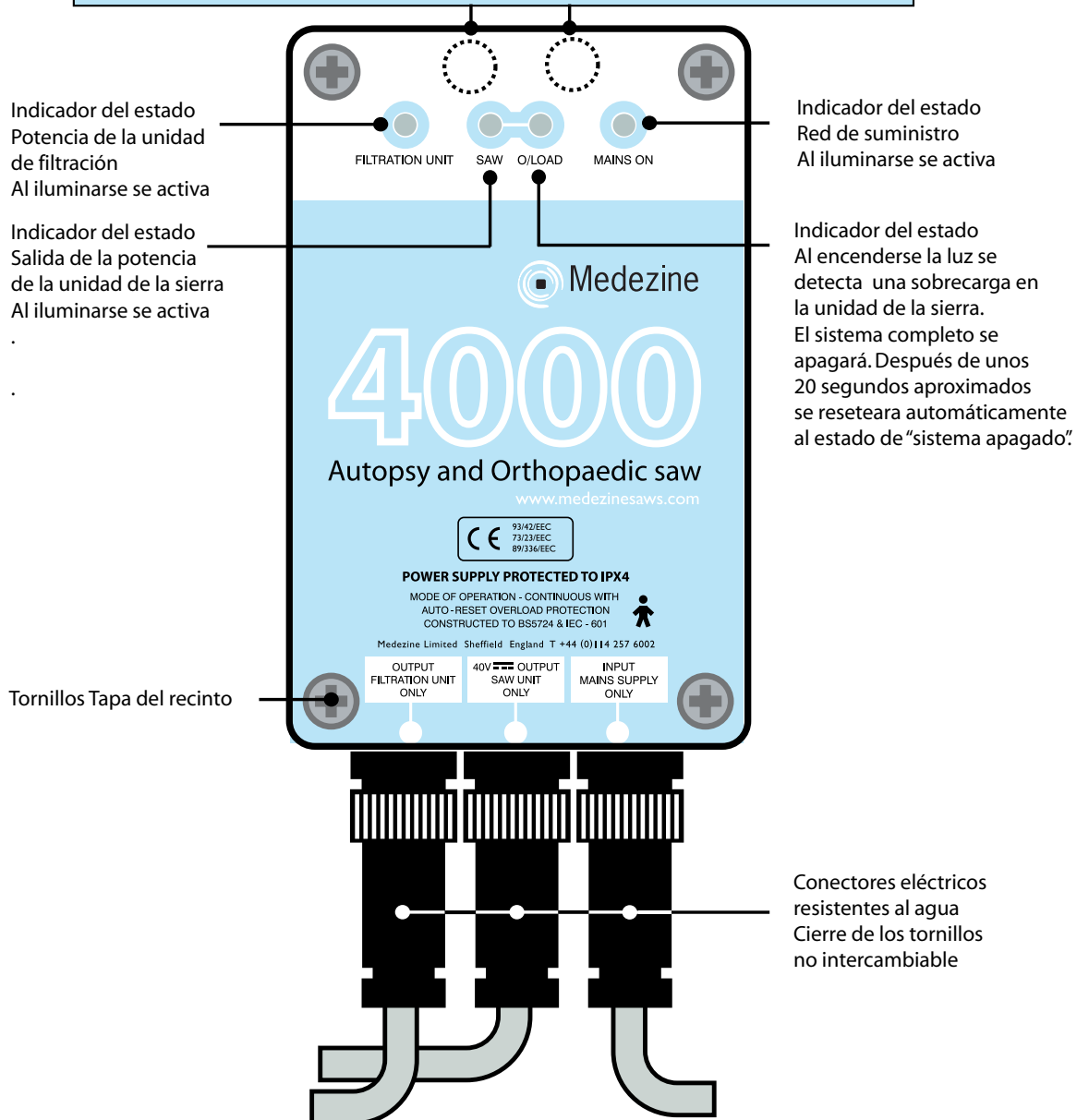


UNIDAD DE LA SIERRA MEDEZINE 4000

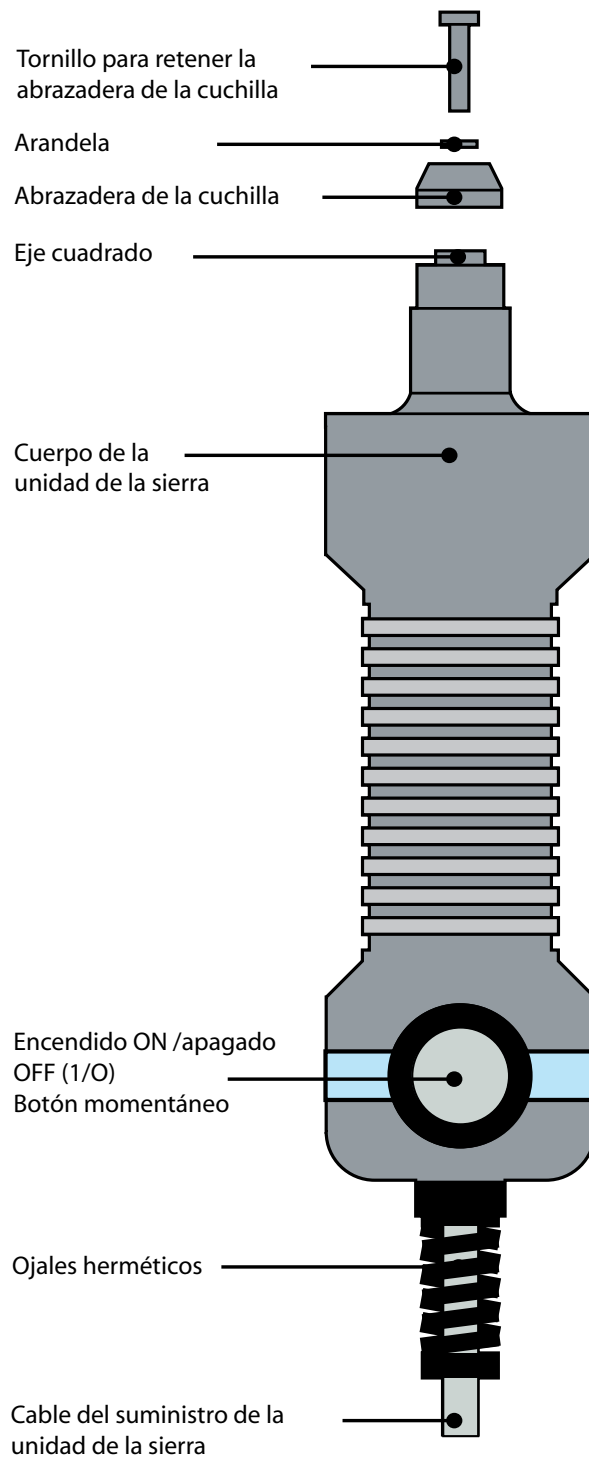

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y PIEZAS DESMONTABLES

REPOSICIÓN DE LA CUCHILLA

- 1 Tire de la manguera de aspiración con la manguera/conector del capotaje desde el capotaje de aspiración.
- 2 Tire del capotaje de aspiración del cuerpo de la unidad de la sierra.
- 3 Suelte los tornillos de la abrazadera que sostiene la cuchilla, con la llave inglesa que le suministramos y quite los tornillos, la arandela y la abrazadera de la cuchilla.
- 4 Reponga o catalogue la cuchilla como sea necesario y asegúrese de que está colocada como debe ser sobre el eje cuadrado. Si no es así, como resultado puede que la sierra se estropee y sea ineficaz.
- 5 Instale el soporte de la sierra, la arandela y los tornillos. **¡Nota!** Es muy importante que la arandela se coloque bien o con el uso, la cuchilla se irá soltando.
- 6 Vuelva a atar los tornillos de la abrazadera, utilizando la llave inglesa que le hemos suministrado. **¡Nota!** Utilizando la llave inglesa será suficiente para ajustar la cuchilla. No es necesario mayor fuerza o ajuste, ya que esto puede traer consigo que el mecanismo interno se estropee.
- 7 Vuelva a colocar el capotaje de aspiración. Este pasará sobre una cuchilla de 64mm, si es comprimido pasará a tener forma de óvalo, para su instalación ver abajo.

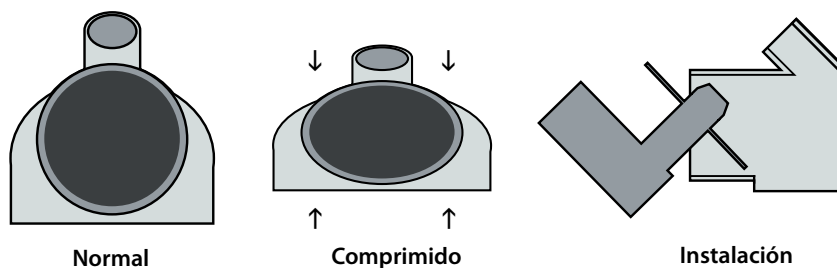

- 8 Instale la manguera/el conector de capotaje, con la manguera en el capotaje.

RECAMBIO DE LA MANGUERA

- 1 Quite la manguera/el conector de capotaje del capotaje. Quite el conector de la manguera de aspiración tirando de él y dándole vueltas hacia la derecha, simultáneamente. Quite la manguera de aspiración de la manguera/el conector de la unidad de filtración de la misma manera.
- 2 Instale la manguera de aspiración en la manguera/el conector de capotaje empujándola y dándole vueltas hacia la derecha, hasta que estén completamente enlazados. Instale la manguera de aspiración en la manguera/el conector de la unidad de filtración de la misma manera.
- 3 Instale la manguera/el conector del capotaje con la manguera en el capotaje de aspiración.

RECAMBIO DEL FILTRO DE PAPEL UTILIZANDO PRESIÓN NEGATIVA

- 1 La unidad de la sierra tiene que estar en su nido (posición park).
- 2 Encienda el sistema desde la unidad de la sierra.
- 3 Cuando el sistema está en marcha, suelte las dos abrazaderas de seguridad y quite la cubierta de arriba.
- 4 De esta manera se puede quitar el filtro de papel y la pestaña de soporte sin que se pierdan los contenidos. **¡Nota!** No se quita el filtro de tela.
- 5 Así, se puede disponer del filtro de papel de una forma apropiada y cerrada. Por favor acuda a su Oficial de Seguridad.
- 6 Apague el sistema desde la unidad de la sierra.
- 7 Inserte el filtro nuevo de papel asegurándose de que está completamente abierto y llena el filtro de tela. Saque la parte alta del filtro de papel para que se coloque la pestaña de soporte sobre la parte saliente. Doblar la esquina del filtro de papel sobre la pestaña de soporte. La entrada del filtro de papel tiene que estar libre.
- 8 Instale la cubierta de arriba y ate las abrazaderas de seguridad.

PARA EL RECAMBIO DEL FILTRO DE TELA Y EL FILTRO DE CARTUCHO VER LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA PÁGINA 9.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN

EL EQUIPO TIENE QUE ESTAR DESCONECTADO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO MIENTRAS SE LLEVEN A CABO LAS SIGUIENTES TAREAS.

LA UNIDAD DE LA SIERRA

Diario

Límpielo en su totalidad, utilizando un cepillo suave de nailon ,que no tenga alambre o cerdas duras con un desinfectante recomendado. Aclárelo y séquelo en su totalidad.

Semanal

Se recomienda poner lubricante con ingeniería ligera o una grasa que tenga como base la silicona, sobre los tornillos, la abrazadera de la cuchilla y el eje cuadrado. No se recomienda el uso de grasas que contenga grafito. Inspeccione el equipo para buscar señales de deterioro.

Anual

Se recomienda la revisión completa de la unidad de la sierra. **¡Nota!** Para que la unidad de la sierra este bajo garantía y para cualquier otro tema relacionado con la garantía de la misma, una persona designada por Medezine tiene que llevar a cabo el mantenimiento de la unidad.

Cualquier otro intento de llevar el mantenimiento por otro partido, la garantía será invalidada.

LA UNIDAD DE FILTRACIÓN

Los elementos del filtro tienen que ser renovados periódicamente, ya que la eficacia de la filtración se daña cuando los elementos se contaminan mucho. Su oficial de Seguridad, le aconsejará sobre el procedimiento correcto para la eliminación de las partículas recogidas y los elementos superfluos del filtro. Hay que tomar en cuenta también, las consideraciones medio ambientales a la hora de decidir la frecuencia pero los siguientes intervalos deberían de ser considerados como un requisito mínimo.

Hay una relación de las revisiones del filtro en la página 15, para que puedan ayudarle a controlar este proceso y aportarle una prueba documentada cuando sea necesario.

Diario

Cambie el papel del filtro. Ver instalación de los accesorios en la página 8.

Semanal

Con un trapo húmedo y el desinfectante recomendado limpiarlo en su totalidad. Séquelo completamente. Inspeccione el tope de la aspiración, la manguera y observe si las conexiones de las mangueras y el filtro de tela tienen alguna obstrucción o alguna señal de deterioro. **¡Nota!** Nunca se lava el filtro de tela. Quite cualquier fibra enganchada, algodones, o materias extrañas de las ruedecillas del chasis.

Cada dos trimestres

Cambie el filtro de tela y el filtro de micra

- 1) Suelte las abrazaderas de seguridad y quite la cobertura superior.
- 2) Quite el filtro de papel y la pestaña de soporte.
- 3) Quite el filtro de tela y deshágase del mismo.
- 4) Suelte la tuerca y la arandela y quite el filtro de micra, a continuación deshágase del mismo.
- 5) Instale el filtro de micra con un precinto de goma hacia abajo, ate la tuerca y la arandela.
- 6) Coloque un filtro nuevo de tela.
- 7) Coloque un filtro nuevo de papel y la pestaña de soporte.
- 8) Coloque la cubierta superior y vuelva a atar las abrazaderas de seguridad.

EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

Semanal

Con un trapo húmedo y el desinfectante recomendado límpielo completamente. Séquelo completamente y mire si hay algún deterioro o si las conexiones no quedan bien.

LOCALIZADOR DE PROBLEMAS

Esta sección trata de problemas posibles y sus causas- se sugieren soluciones. Si el problema que tiene no aparece en este listado o si todavía necesita ayuda haga el favor de contactar con el agente/el fabricante. Ver página 19.

Nota: Desconecte el equipo de la red de suministro antes de intentar implementar cualquier solución de naturaleza eléctrica.

Síntoma	Posible causa	Solución
El sistema no empieza	El indicador de la red de suministro no se enciende Ha saltado el plomo Mala conexión	Nota. Las siguientes resoluciones deben llevar a cabo por un electricista cualificado. Compruebe la clavija del fusible Compruebe los fusibles del suministro de energía Ver página 6 para acceder Compruebe que todos los conectores eléctricos están unidos correctamente.
El plomo salta repetidamente	Suministro de voltaje incorrecto La unidad de filtración se ha utilizado para extraer líquidos	Nota. Las siguientes resoluciones se deben llevar a cabo por un electricista cualificado Compruebe que el voltaje clasificado del equipo es compatible con el del suministro eléctrico Desconecte el conector de la unidad de filtración del suministro de energía. Si el plomo no salta a la hora de encender la unidad de corte quiere decir que la unidad de filtración es defectuosa.
El sistema se apaga	El indicador de sobrecarga está encendido Conexión defectuosa	Espere hasta que el indicador amarillo de sobrecarga este apagado (aproximadamente 20 segundos) e intentar de nuevo Compruebe que los conectores de la unidad de corte y la unidad de filtración están correctamente enlazados al suministro de energía.
El sistema se apaga	El indicador de sobrecarga está encendido. Cuchilla deformada Cuchilla desafilada. Cuchilla colocada incorrectamente Presión excesiva sobre la pieza de trabajo	Desechar inmediatamente Cuchilla por lo que una nueva parte se pone en contacto con la pieza de trabajo Compruebe que la cuchilla está colocada siguiendo las instrucciones del fabricante, Ver page 8. Vea los consejos de corte, página 12.
El indicador del estado de la unidad de filtración se enciende aunque no funciona. La unidad de corte si funciona.	Conexión defectuosa Motor defectuoso	Compruebe que la conexión del suministro de energía está enlazado correctamente. Contacte con el fabricante.

LOCALIZADOR DE PROBLEMAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible causa	Solución
El indicador del estado de la unidad de corte se enciende pero no funciona. La unidad de filtración sí funciona.	<p>Conexión defectuosa</p> <p>Motor defectuoso</p>	<p>Compruebe que la conexión del suministro de energía está enlazado correctamente</p> <p>Contacte con el fabricante.</p>
Ruido excesivo de la unidad de la sierra	<p>Cuchilla deformada</p> <p>Cuchilla malamente colocada o la cuchilla está floja</p> <p>Servicio de cojinetes necesario</p>	<p>Renueve la cuchilla</p> <p>Compruebe que la cuchilla se ha colocado siguiendo las instrucciones del fabricante</p> <p>Ver página 8.</p> <p>Contacte con el fabricante.</p>
La unidad de filtración no extrae	<p>La unidad de filtración no funciona</p>	<p>Compruebe que la conexión del suministro de energía está enlazado correctamente y que el indicador de la unidad de filtración está encendida cuando la unidad de corte está en marcha.</p>
La unidad de filtración está en marcha pero no extrae eficazmentet.	<p>La manguera de aspiración está torcida, bloqueada o suelta.</p> <p>Los elementos del filtro no están montados correctamente</p> <p>El filtro de papel está lleno.</p> <p>El filtro de papel está roto.</p> <p>El filtro de tela está obstruido.</p> <p>El filtro de tela está roto.</p> <p>El filtro de micra está obstruido</p>	<p>Repare o reponga el tubo. Vea página 8 para pruebas.</p> <p>Asegúrese de que el filtro de tela está puesto correctamente. Asegúrese de que el filtro de papel y la pestaña de soporte están colocados y asentados correctamente. Asegúrese de que la tapa está bien colocada y las abrazaderas de seguridad están bien enlazados.</p> <p>Cambie el filtro de papel. Ver página 8</p> <p>Cambie el filtro de papel y compruebe el filtro de tela para ver si hay alguna contaminación.</p> <p>Cambie el filtro de tela. Ver página 9</p> <p>Cambie el filtro de tela y compruebe el filtro micra si tiene alguna obstrucción.</p> <p>Cambie el filtro de micra, ver página 9.</p>

CONSEJOS PARA EL CORTE

La sierra oscilante Medezine 4000 ha sido diseñada y construida para aportar un corte altamente eficaz y sin esfuerzo, para las zonas apropiadas para su uso. Le aconsejamos un periodo de prueba de corte- con la menor presión posible sobre la pieza a trabajar hasta que se acostumbre con eficacia. No se necesita gran presión, esto disminuirá la velocidad de corte.

Par quitar el molde se aconseja pasar la cuchilla oscilante ligeramente y con agilidad sobre la superficie de molde. Realizando un corte no profundo sobre la línea de corte. Así se asegura que la cuchilla mantiene el corte mientras corta la profundidad completa.

Si experimenta algún problema consulte el localizador y resolución de problemas de la página 10 y 11.

Durante el corte hay llevar un protector para los ojos

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

La sierra solamente puede soportar temperaturas de entre -20 C a +70 C. Se tiene que tomar en cuenta al considerar el método de desinfección y esterilización.

No se recomienda el autoclave del equipo

Utilice solamente productos de limpieza que sean seguros y buenos para usar sobre los metales. No recomendamos el uso de Glutaraldehyde o Formaldehyde ya que pueden crear corrosión.

Le aconsejamos el uso de un cepillo, no metálico suave y frote suavemente, aclárelo con agua limpia y séquelo si es necesario. No utilice agua a presión directamente sobre cualquier parte de este equipo, ya que puede invalidar la garantía.


Todos los productos de limpieza tienen que ser mezclados, almacenados y aplicados según las instrucciones del fabricante.

Nota. Tome precauciones normales al mezclar y aplicar los productos de limpieza tales como protectores de ojos, ropa adecuada y guantes. Siempre lea las recomendaciones del fabricante.

ACCESORIOS Y PIEZAS SEPARABLES

Código pedido	Descripción	Cantidad
MSYS 4000	Medezine 4000 Completo con sistema de filtración	Cada
MSYSOORT	Medezine 4000 Suministro de energía y unidad portátil de La pieza manual	Cada
MHPC 4000	Medezine 4000 sólo pieza manual	Cada
MPS 4000	Medezine 4000 sólo suministro de energía	Cada
MFIL 4000	Medezine 4000 sólo unidad de filtración	Cada
MBC 64M	Cuchilla circular para la sierra 64mm, Autopsia	Paquete de 10
MBC 64P	Cuchilla circular para la sierra 64mm, Escayola	Paquete de 10
MBC 76	Cuchilla circular para sierra 76, Autopsia	Paquete de 10
MBS 51	Cuchilla segmentada para sierra, 51 mm	Paquete de 10
MVH	Medezine 4000 Topes de aspiración	Paquete de 10
MVP	Medezine 4000 Tubo de aspiración de 1.6m	Cada
MPF50	Filtro de papel para la unidad de aspiración	Paquete de 50
MCF	Filtro de tela para la unidad de aspiración	Cada
MMF	Filtro de micra para la unidad de aspiración	Cada
MVPEX	Extensión de la manguera de aspiración de 4 m de largo	Cada
MEL	Unidad de la Sierra, correa de extensión utilizada con lo de Arriba	Cada
MVP40	Equipo de extensión aspiración- ambas partes de arriba	Cada
MKITSQ	Equipo de abrazadera para cuchillas	Cada
MKITSERV	Medezine 4000 Equipo de resoluciones	Cada
MKITCONT	Medezine 4000 Revisión anual del filtro	Cada
MML	Medezine 4000 Cable red de suministro	Cada
MCONFU	Conector manguera-Para la manguera de aspiración con La unidad de filtración	Cada
MCONVU	Conector manguera-Para la manguera de aspiración con El tope de aspiración en la pieza manual	Cada
MHPCEX	Medezine 40000 Servicio intercambio pieza manual	Cada

ESQUEMA DEL CABLEADO MEDEZINE 4000

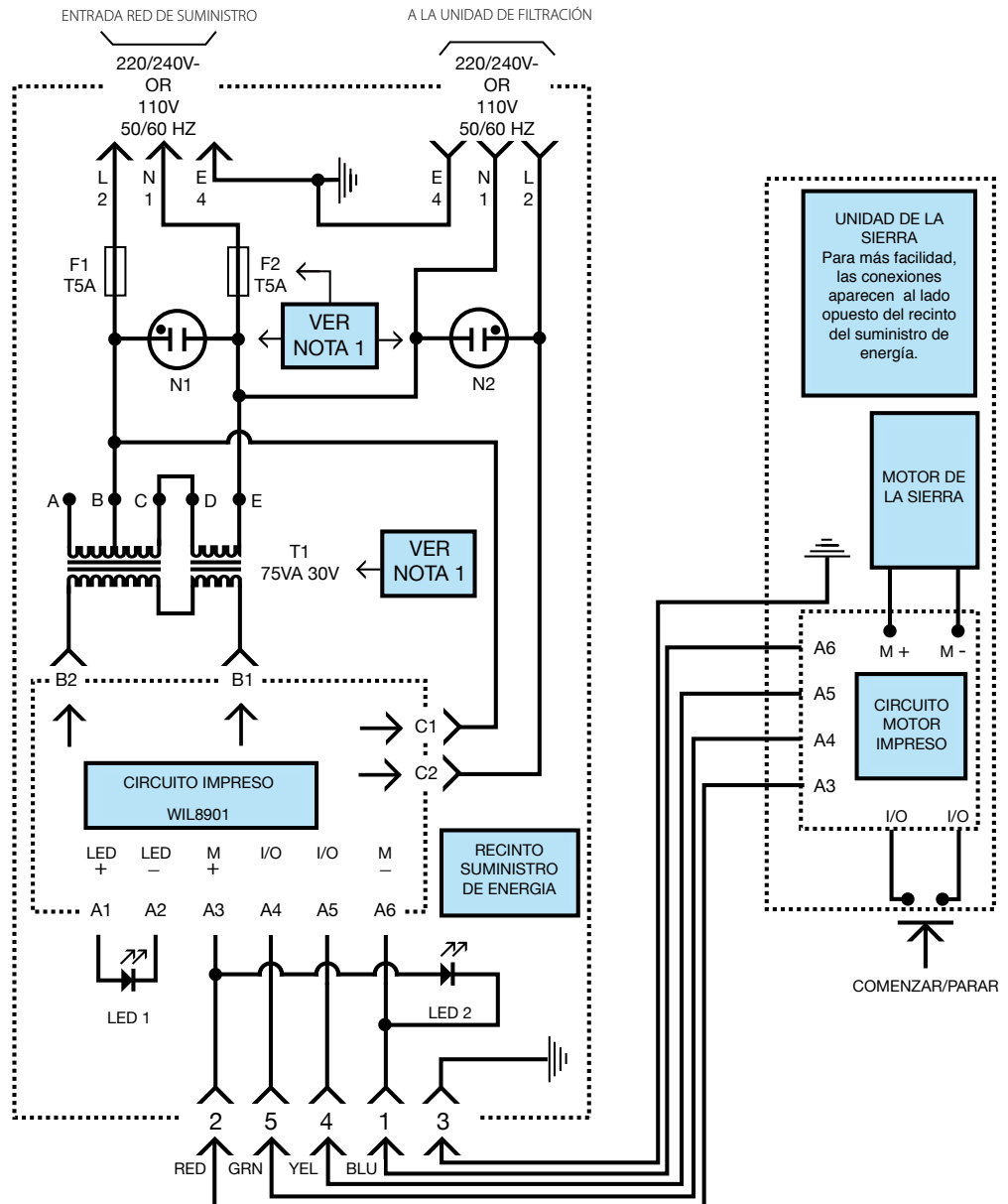

Nota 1
 El transformador demuestra un cableado para 220V- Suministro
 Para 110V-suministro quitar el link C-D y añadir el link C-E y B-D
 Cambiar los fusibles F1 y F2 a T10A
 Cambiar los indicadores de neón N1 y N2 a la versión 110V

RELACIÓN DE LAS REVISIONES DEL FILTRO

Esta página es para documentar el historial de las revisiones del filtro para cumplir con los requisitos de la legislación C.O.S.H.H. . El equipo completo de las revisiones del filtro (MKISERV) incluye el capotaje de aspiración (MVH) y los filtros de papel (MPF50) aunque la provisión de estos no está incluido en la relación de las revisiones, ya que se consideran más consistentes en la revisión diaria del equipo.

1

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

2

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

3

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

4

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

5

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

6

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

7

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

8

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

9

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

10

Fecha de la revisión_____

Firmado_____

Reposición del Tubo de aspiración MVP

Reposición del Filtro de tela MCF

Reposición del Filtro de Micra

LAS CONDICIONES DE LA GARANTIE

Medezine Ltd toma el cargo de reparar o reponer el equipo en su discreción sin cargo alguno para el comprador en caso de que el equipo no funcione por material(es) o trabajo defectuosos, en los siguientes casos:

- 1 El uso del equipo ha sido cuidadoso y no hay ninguna señal de abuso, dejadez o daños por accidente.
- 2 El equipo haya solamente sido utilizado para los propósitos para los que haya sido diseñado.
- 3 El mantenimiento de prevención haya sido realizado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 4 No haya habido ningún intento de reparación o intento de desmontar el equipo a excepción de parte de un representante de Medezine o agente designado por Medezine Limited.
- 5 Cualquier petición de reparación o reposición se haya realizado dentro de un mes del calendario de la aparición del problema.
- 6 Las condiciones de garantía se mantienen vigentes durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de compra.
- 7 Esta garantía no afecta a sus derechos estatutarios.

Medezine Ltd tiene como principio el desarrollo continuo del producto y asegurar a nuestros clientes el mejor servicio posible. Para obtener esto, puede que se cambien los detalles y especificaciones sin notificación previa.

Los propietarios del equipo, que están fuera del Reino Unido, deberán de consultar con el distribuidor o agente de compra sobre los recambios de las piezas y facilidades de reparación. El distribuidor /el agente le aconsejará de la mejor acción en curso a tomar.

CERTIFICADO DE LA PRUEBA ELECTRICA


Las siguientes pruebas se han realizado con el dispositivo verificador Megger PAT2 portátil y se aplica solamente a la combinación de equipo, cuyos números de serie Están identificados como suministrados por esta garantía.

Prueba vínculo Tierra	6v A.C.R.M.S. paso máximo 1ohm
Prueba de aislamiento	500V dc. Paso máximo 2Mohm
Prueba de destello	1.5kV a.c.r.m.s. (clase 1) paso máximo 3mA
Prueba de carga	6V paso máximo /zona verde/dispositivo verificador
Prueba de funcionamiento	Funcionamiento normal paso máximo 1KVA

Verificado por _____ Fecha _____

Comprado por _____ Fecha _____

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS

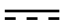Equipo	Serie	Suministro de voltaje	Salida toma auxiliar
Suministro de energía 4000		V-50/60HZ 75 VA	V-50/60HZ 750 W
Unidad de la sierra		40V 	No aplicable
Unidad de filtración 4000		V-50/60HZ 750W	No aplicable



Medezine Limited
Churchill Way Chapeltown
Sheffield England
S35 2PY

T +44 (0)114 257 6002
F +44 (0)114 257 6222
E sales@medezinesaws.com
W www.medezinesaws.com



2002/289